

高速脱毛器 ゼロファスト



本商品資料は商品の特徴や技術・性能、及び安全性を説明することを目的として作成しておりますので、誤解法に接触する恐れのある、不適切な美容表現が含まれています。本資料は美容関係者に向けた資料の為、一般消費者の方への開示・配布を禁止とさせていただきます。

特徴

世界最小最軽量クラスマシン

世界最小クラス・最軽量の業務用除毛機器です。
省スペースでどんなサロンにも置きやすいサイズです。

※当社調べ

全身約15分で完了！回転率UP！

高速連射で施術時間を大幅短縮し、スタッフ様の負担を減らします。

※当社比

低価格本体&選べるハンドピースで初期費用削減！

メニュー、予算に合わせて必要なハンドピースのみを購入するため、
初期費用を削減できます。

MAX冷却－4℃のハイパワー冷却

安心・安全の冷却除毛を実現！－4℃のヘッドでお肌を冷やしながら照射するため
痛みを感じにくく、デリケートゾーンやメンズ脱除毛でも安心です。

※個人差があります

充実の導入研修有の安心サポート！


納品時には専任のインストラクターによる無料講習が受けられます。

自動レベル設定


簡単 3 ステップ操作

分かりやすい日本語表示で
肌色・部位・毛質を選ぶだけで自動的に適正出力を設定するため
安全かつ効果的なトリートメントが簡単に行えます。

※手動レベル設定も可能です。

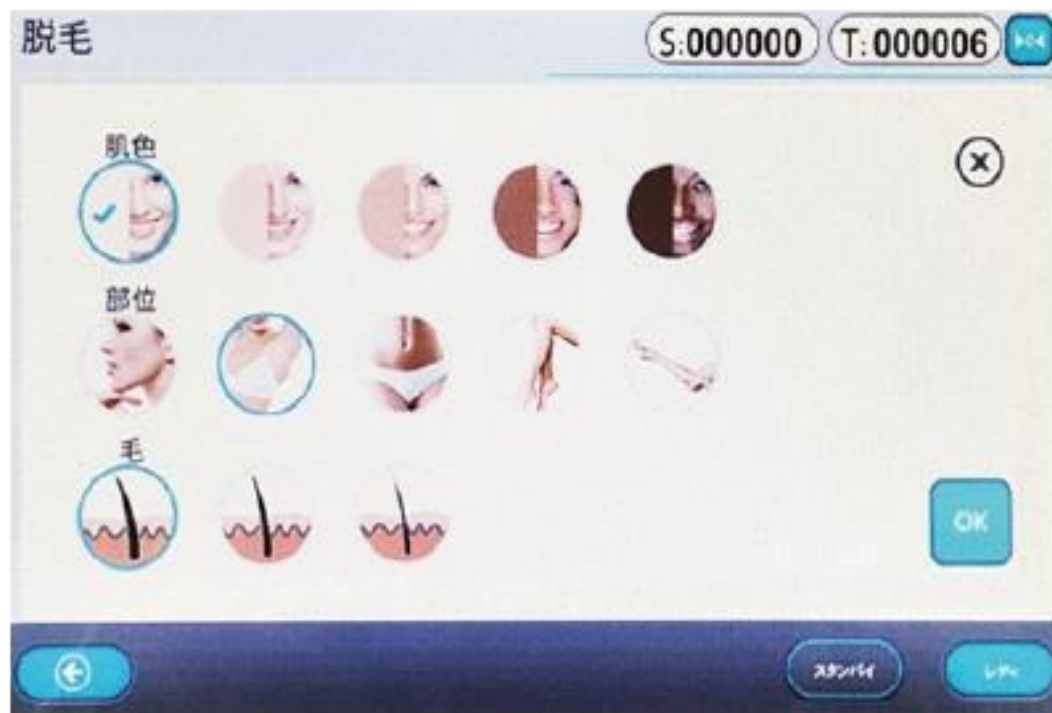


光について

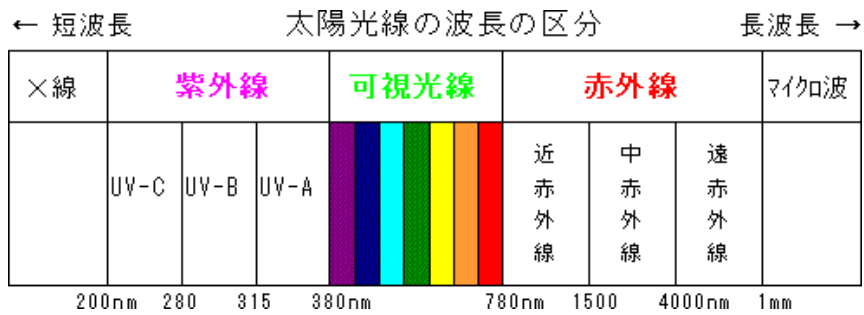

トリートメント有効波長帯530nm～1200nm

ケルンライトは、太陽光から紫外線を取り除いた可視光線～赤外線と呼ばれる肌に優しい波長を使用しているため、安心してご利用いただけます。

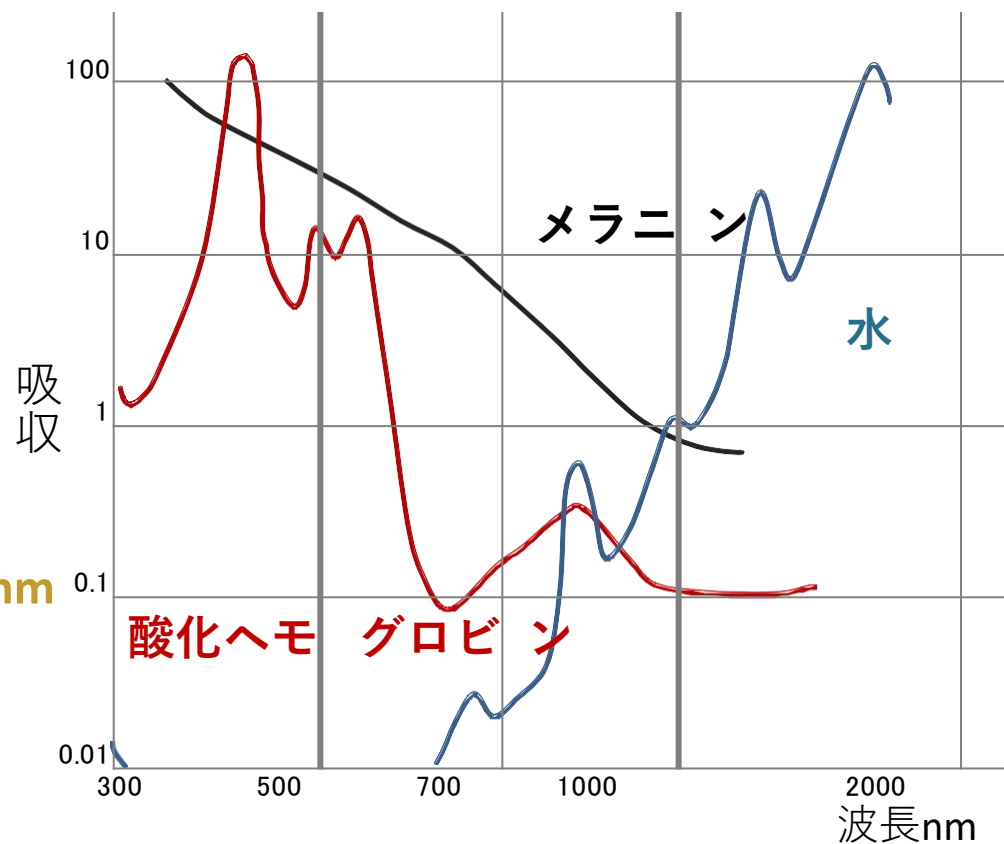

除毛690nm～1200nm

光フェイシャル530nm～950nm

選べるIPL除毛 & SHR除毛


お好みに合わせた除毛方法を選択可能

ケルンライトは、
従来のIPL方式に加え、最新式のSHR方式も搭載しています。

タッチパネル上のボタン1つで簡単に切り替え可能なため、毛質や肌質、部位など、
お客様の状態に応じた施術方式で、**より満足度の高い施術が行えます。**



毛周期

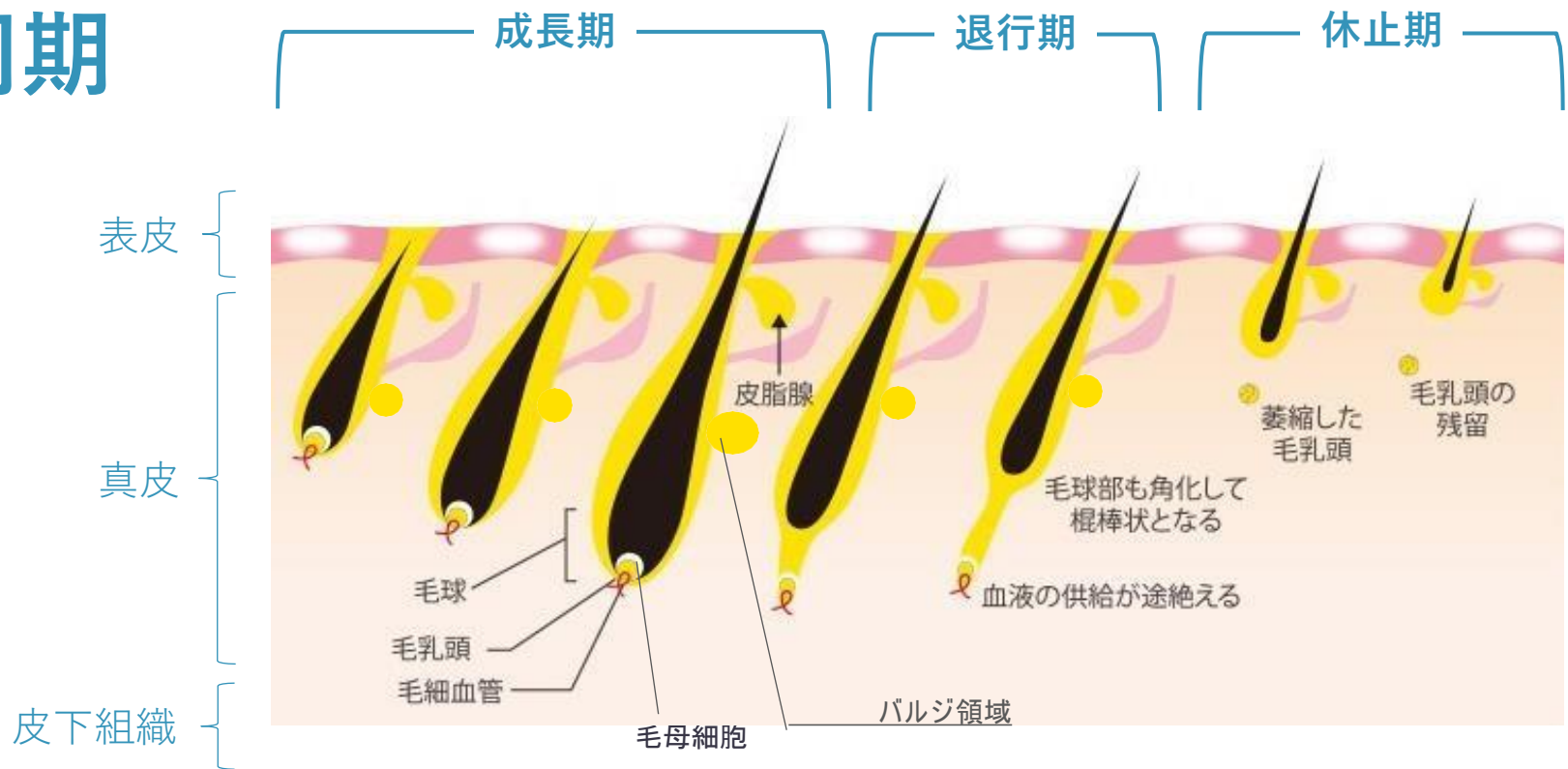


IPL除毛とはインテンス・パルス・ライトの略で、黒いものに反応する光を照射することで毛の再生を抑制する除毛方法です。

黒いものに反応するため、成長期の毛のみに有効です。

退行期・休止期の毛には反応しないため、毛周期に合わせて除毛を行います。

最新蓄熱式除毛

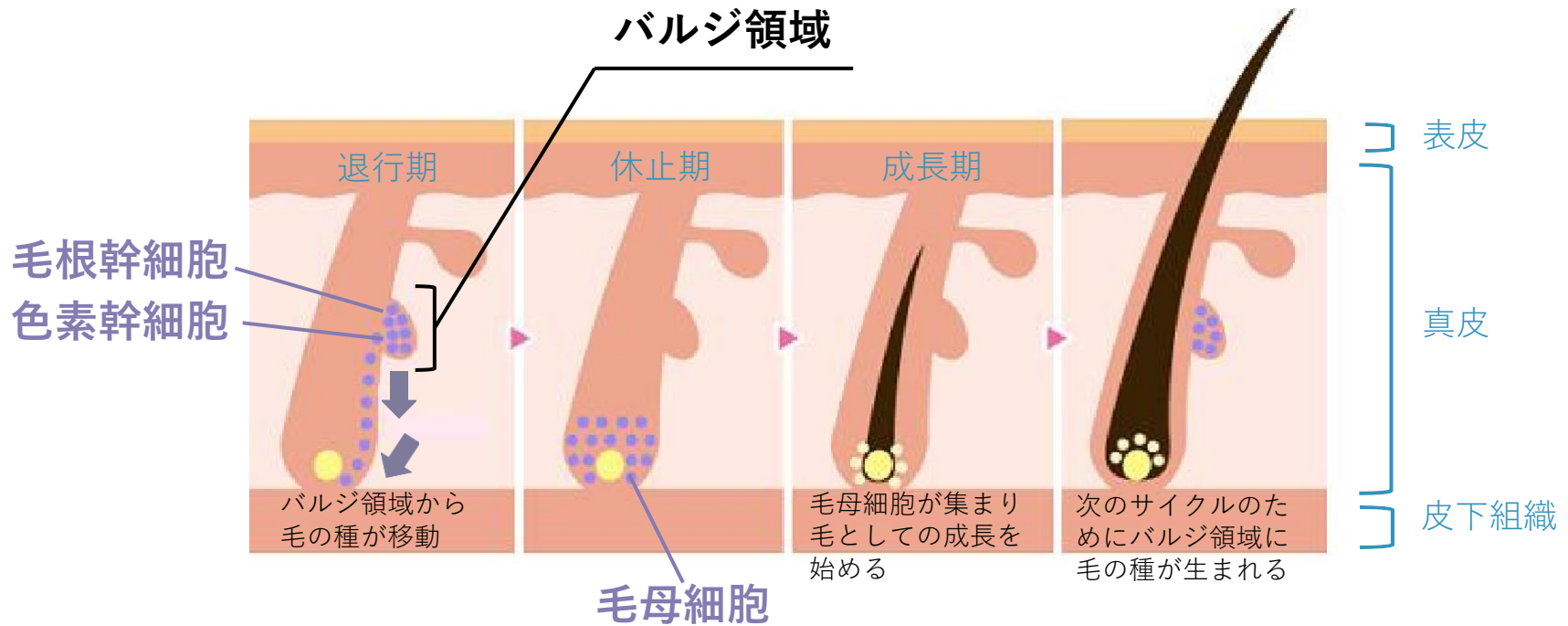

最新の蓄熱式除毛とは

スーパー・ヘア・リムーバルの略で、毛包全体に光を蓄熱させることにより毛の再生を抑制する除毛理論です。

毛包全体をターゲットとしているため、毛周期に関係なく除毛が可能です。

光フェイシャル


光フェイシャルとは、
特殊な光をお肌に照射する
ことで線維芽細胞を刺激し、
コラーゲン・エラスチンの生
成を促します。
ターンオーバーが正常化され
るため、様々な肌トラブルに
内側から働きかけます。

お顔だけでなく、
バストのトリートメントにも
効果的です。

痛みやダウンタイムがほとん
どないため、終了後すぐにメ
イクが可能です。

健康な肌

トラブル肌

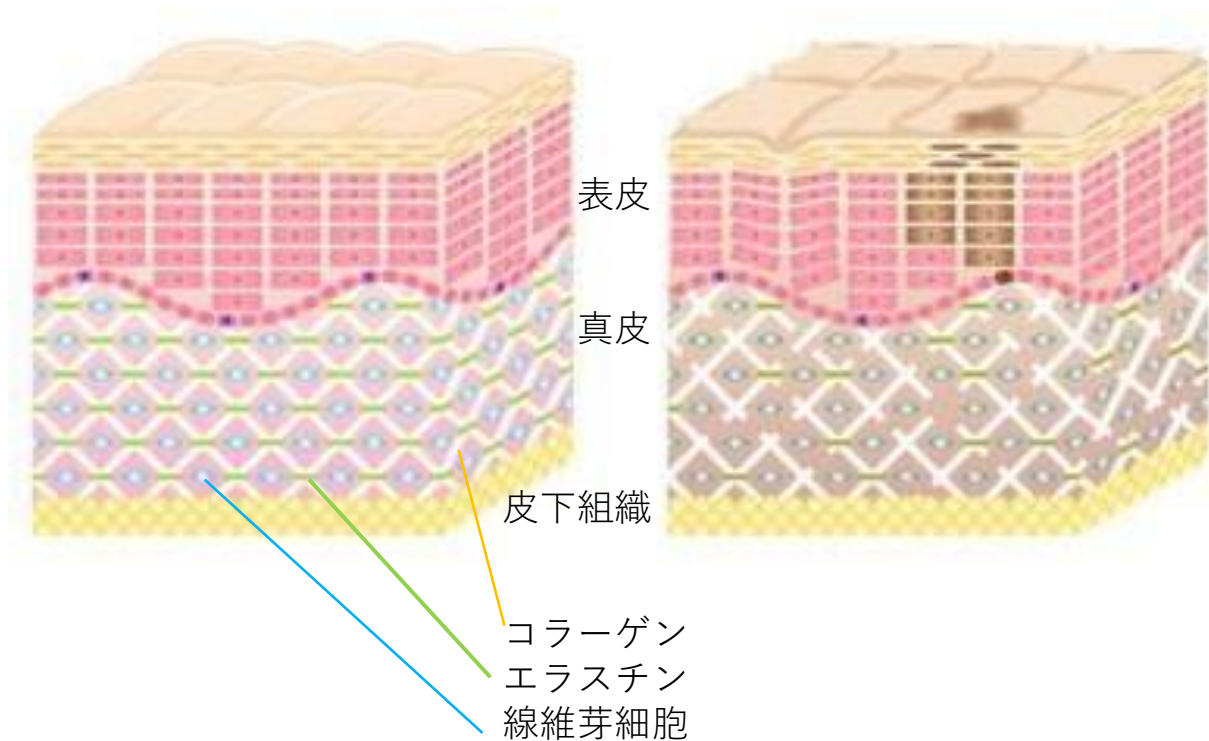

シワ、シミ、くすみ、赤ら顔、たるみ、
毛穴の開き、ニキビ、ニキビ跡等・・・
様々な肌トラブルに対応可能！！

禁忌事項

下記に当てはまる方・部位には安全のためトリートメントできません。

【体内に電子機器を装着されている方】

- ・ペースメーカー・人工心肺等の生命維持用電子機器・心電計等の装着型の医療電子機器

【部位】

- ・粘膜（唇・乳輪・鼻孔・生殖器・肛門など）・傷・傷跡・シミ・そばかす・色素沈着・ほくろ
- ・アザ・白斑・色素欠乏症・血管腫・静脈瘤・美容整形部位・入れ墨・タトゥー・日焼け

【皮膚疾患】

- ・皮膚がん・メラノーマ・ヘルペス・イボ・タムシ・白癬・とびひ・せつ など

【内科疾患】

- ・持病や疾患のある方は、医師の判断を得てから施術をしてください。

【体質】

- ・アトピー性皮膚炎・光アレルギー・光線過敏症・ケロイド体質

【生理中】

【服用中の薬がある方】

- ・服用中・塗り薬・貼り薬を使用中の方は、使用終了後期間を空けて
または医師の確認を得てから施術をしてください。

※原則として通院・治療中・投薬中の方はお医者様のご確認をお願い致します。

※気分が悪くなったり、肌に異常が現れたら、直ちに使用をやめて下さい。

仕様

本体仕様	
サイズ	W28× D41× H26 (cm)
本体重量	約18K g
使用電源	110V
使用電力	1500V A
波長	除毛 : 690nm~1200nm 美顔 : 530nm~950nm
照射面積	50mm×10mm
冷却装置	ペルチェ式